

# VITA SMART.FIRE®

Startup  
Inbetriebnahme

1. Startup  
Inbetriebnahme

2. Starting firing process  
Brennvorgang starten

1 Device connection  
Geräteanschluss



Connect the firing unit and control unit with the connection cable.  
*Brenneinheit und Bedienelement mit Verbindungskabel verbinden.*

2 Mains power connection  
Netzanschluss



Connect the firing unit to the mains voltage.  
*Brenneinheit an Netzspannung anschließen.*

3 Switching on firing unit  
Brenneinheit einschalten



Press the main switch.  
*Hauptschalter betätigen.*

4 Inserting firing platform  
Brennsockel einsetzen



Insert the firing base in the designated recessed space.  
*Brennsockel in die vorgesehene Vertiefung einsetzen.*

5 Open accessory compartment  
Zubehörfach öffnen



To open, press the panel inwards, and remove the firing tray.  
*Zum Öffnen Blende nach innen drücken, Brennuträger entnehmen.*



For „Starting firing process“/please turn over!  
Für „Brennvorgang starten“/bitte wenden!

# VITA SMART.FIRE®

Start firing process  
*Brennvorgang starten*

**1.** Startup  
*Inbetriebnahme*

**2.** Starting firing process  
*Brennvorgang starten*

**1** Prepare firing  
*Brandvorbereitung*



Activate standby temperature.  
*Bereitschaftstemperatur aktivieren.*

**2** Available programs  
*Programmwahl*



Select firing program.  
*Brennprogramm auswählen.*

**3** Place restoration  
*Platzierung Restauration*



Place the firing tray and restoration  
on the firing base.  
*Brennträger mit Restauration auf  
Brennsockel platzieren.*

**4** Start firing  
*Brandstart*



Start firing process.  
*Brennvorgang starten.*

**5** Completing firing  
*Brandabschluss*



The fire clearance report appears.  
*Meldung zum Brandabschluss erscheint.*

**6** Removing restoration  
*Entnahme Restauration*



Remove the firing tray and restoration  
and place them on the cooling table.  
*Brennträger mit Restauration entnehmen  
und auf Abkühltisch platzieren.*

